

製品仕様

製品名	MoonBeam™3
UVC照射範囲(垂直)：	150mm~2100mm(高さ)
サイクル時間(秒)：	90,180,300,600
装置重量：	装置全体： 17 kg ベースユニット： 13 kg
環境：	オゾン発生なし、高出力のUVCランプ
化学物質の使用：	なし
装置サイズ：	380mm×1120mm
音響ノイズ：	少量
電源：	100-120V～、 3.2A . 50/60Hz 200-240V～、 1.6A . 50/60Hz

装置部品

製品名	詳細
MoonBeam™3 セントリアシスト テクノロジー	本システムは、追加の安全機能としてMoonBeam™3のベースユニットから物理的に独立して設置するように設計されており、フルゾーンの動作検出機能により、高い人体検出安全性を実現します。
MoonBeam™3 電球セット(3個)	MoonBeam™3 交換用UVC電球(3セット)

 Diversey

Moon Beam™3 UVC 殺菌システム

患者さんのアウトカムの
向上をさらに保証



お問い合わせ先・販売元

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター株式会社**

医療カンパニー
メディカルソリューション事業部 高度医療部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目18番19号
Tel 03-3578-7874 Fax 03-3578-7819

Moonbeam™3

感染症対策への新たな視点



さらなる感染予防となるUVC殺菌装置の導入をご検討ください

標的型殺菌のためのツール


MoonBeam3は、ポータブルで、効果的に、そして安全に殺菌を行います。病室、手術室、トイレなど高頻度に接触する環境表面の高速かつオンデマンドの殺菌を目的として設計されており、医療機器などにも使用できます。

個別に調節が可能な3つのアーム

ほぼ全ての角度でUVC光を照射することができるため、少量のエネルギーで照射量を増大化できます。ヘッドのポジショニングにより環境表面や機器に対するUVC射量を最適化できます。また装置の設置が簡単なため、病室中や施設中を高速かつ効果的に殺菌することが可能です。

費用対効果の高い殺菌を保証

操作は簡単で、わずか3分で作業は完了します。標的を絞った効率の良い照射により殺菌時間を短縮でき、労働・運用コストを抑えることができます。MoonBeam3は、清掃作業に加え殺菌プロセスをさらに効果的なものとし、患者さんや清掃スタッフの感染リスクを減らします。定期メンテナンスは電球を交換するだけでよく、工具などは必要ありません。

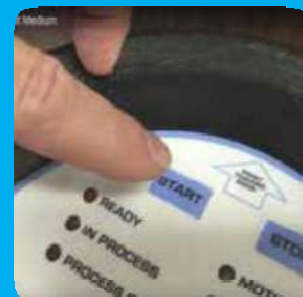

操作は簡単

MoonBeam3の操作はたったの3段階
STEP1: コンセントに差し込む。
STEP2: ベッドの位置を決定。
STEP3: スタートボタンを押して起動。



ポータブルで幅広い用途

MoonBeam3はポータブルで、起動に1分もかかりません。そのため、クリーニングカートに積み込むこともでき、毎日のクリーニングや殺菌業務の一環としてご使用いただけます。



装置の安全性

MoonBeam3は、UVC光を用いて病原菌を不活化します。化学薬品を使用しておらず、ガスも発生しません。リモートセンシング技術により、殺菌作業中に動作が遮断されれば装置は停止し、患者さんやご家族、病院スタッフをUVC光から守ります。

患者さんのアウトカムを最適化

高い効率性

3分で最適な殺菌を実現

広い照射角度と高い強度

角度調節が自在で照射強度も高い

素材への適合性

硬質の表面でも安全かつ効果的な照射が可能

毒性なし

ガスの発生はなく、化学薬品も不使用

移動が簡単

患者さんのケアや処置を行う全ての部屋での頻繁な使用に理想的

高い費用対効果

運用コストは低く、メンテナンス費用も最小限

殺菌使用例

オーバーベッドテーブル、ベッドサイドテーブル、患者モニター、IVポール、手洗い場、PC・周辺機器、ポータブル機器、リモコン類



オプションのセントリアシストテクノロジーにより、作業スタッフの安全を最大限に考慮したフルゾーンの動作検出を提供。

リモートカバーが装置の運転を制御し、稼働中に安全装置として機能。



MoonBeam3ヘッドにUVCランプが付いており、水平方向への照射にも対応。数百通りのポジショニングが可能。