



## Puritan Bennett™ 560 Ventilator



## Puritan Bennett™ 560 Ventilator

患者さんの自立性をサポートし、介護者の安心を高めるために

- Puritan Bennett 560は、使いやすく、多様なパフォーマンスを発揮するポータブルベンチレータです。
- 小児 (5kg以上) から成人まで、マスクもしくは気管切開の幅広い患者さんに、そして介護者に対しても、安全で快適な環境を提供します。
- ボリュームコントロールとプレッシャーコントロールの換気が可能です。
- 軽量・コンパクトな設計で長時間 (最大11時間) 駆動可能なバッテリーを内蔵し、外出時にも使用できます。専用のバッグと車椅子を組み合わせればさらに行動範囲が広がります。
- 院内から在宅まで、幅広い環境での使用が可能です。

### 専用外部バッテリー POWERPACK2

- POWERPACK2搭載でさらに最大9時間の使用が可能です。  
(バッテリー標準1本搭載時)
- 軽量・コンパクトです。
- 充電時と使用時の操作が簡単になりました。




# INDEPENDENCE FOR PATIENTS. PEACE OF MIND FOR CAREGIVERS.



## Increase patient mobility 外出時にも使用可能

- 最大11時間使用可能な内部バッテリーを搭載。
- 内部バッテリーの残量はリアルタイムで表示され使用可能時間がわかります。
- 外部バッテリーと組み合わせると、さらに長時間の使用が可能です。


🔋 ≈08h50

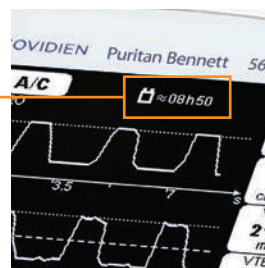

## Improve medical efficacy

### 医療の質の向上をサポート


- 設定値と実測値が同画面で確認できます。
- 使用状況を24時間毎にて表示し、安全動作確認が容易に行えます。

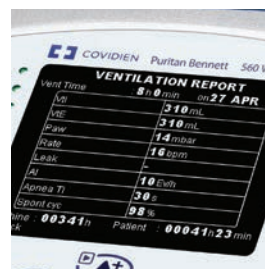

## Increase healthcare efficiency

### 扱いやすい設計

- 軽量 (4.5kg)・小型なので設置や移動が容易です。
- 作動音は30dBA以下の静音設計です。
- 大型のディスプレイには、設定値やアラームメッセージ、波形を表示します。

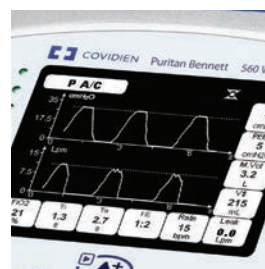

# ACCESSORIES FOR PURITAN BENNETT™ 500 SERIES



患者さんや用途に合わせてご使用いただけるよう  
豊富なアクセサリを取り揃えております

POWERPACK2 POWERPACK2<sup>1)</sup>



10109802 DC接続ケーブル 25CMPP2<sup>1)</sup>

10127418 DC接続ケーブル 80CMPP2<sup>1)</sup>



10131159 POWERPACK2 ACアダプタ<sup>1)</sup>



10131191 AC電源帰線ケーブル PP2<sup>1)</sup>



9091017 POWERPACK2  
モバイルケース ブルー



# Puritan Bennett™ 500 シリーズ用アクセサリ

10028771 エアインレットフィルタ  
(6個入)<sup>1)</sup>



2962799 酸素インレットコネクタ  
(10個入)<sup>1)</sup>



3814199 FIO2測定キット<sup>1)</sup>




(Puritan Bennett 560のみ)

10046803 呼吸ブロック (10個入)<sup>1)</sup>



(Puritan Bennett 560のみ)

VD56010 シングルブランチ用カバー

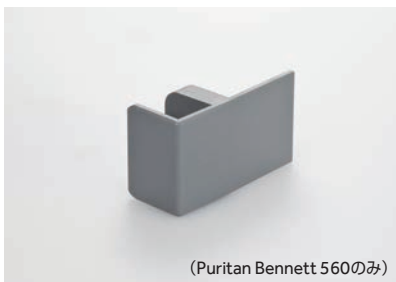

(Puritan Bennett 560のみ)

10094625 PB500 12Vシガーライターケーブル<sup>1)</sup>




10000914 リモートアラームケーブル<sup>1)</sup>



3829000 キャリングバック



9091015 モバイルバック  
リュックガタケース ブルー

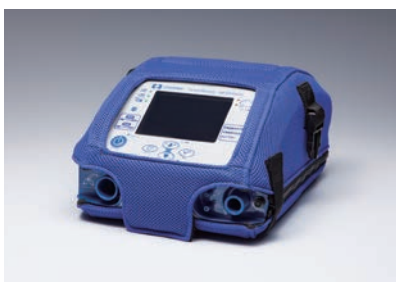

10000464 PB500シリーズ専用カート<sup>1)</sup>



SR-33B-2 キカイタクシ テスリツキ  
PB500シリーズ



PB560001 PB560ハイブリッドカート




※ アクセサリ類はオプション


呼吸回路 (呼気弁あり)

DAR


5094000Z 成人ダブル回路 1ヶ<sup>2)</sup>

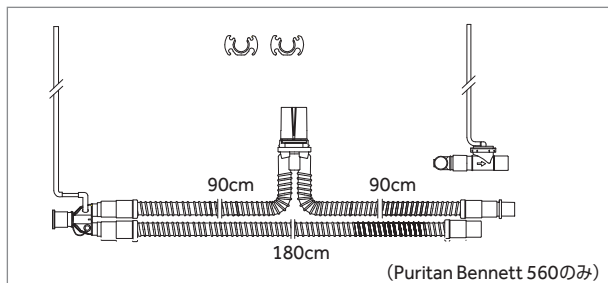

5093601 成人用シングル回路<sup>2)</sup>

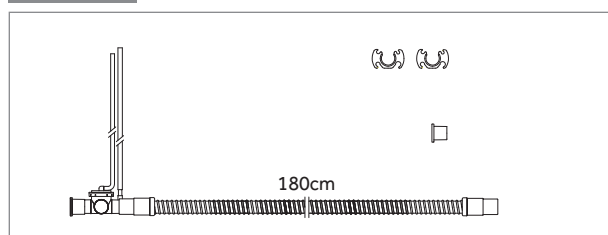


5093501 小児用シングル回路<sup>2)</sup>

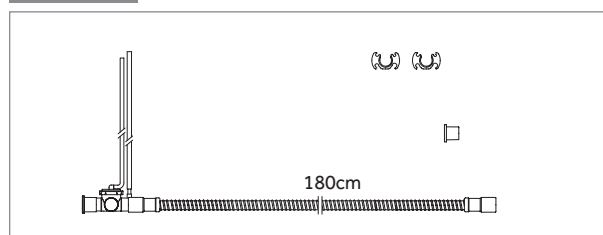


Pacific Medico


51002790 ダブルスリーブH成人用回路<sup>3)</sup>

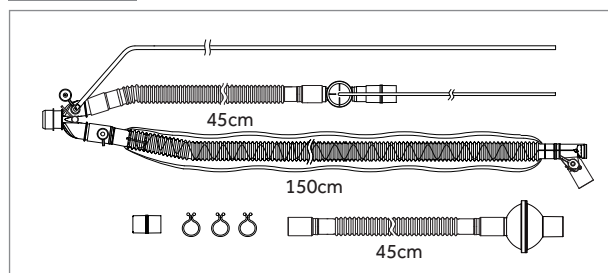


51002791 ダブルスリーブH小児用回路<sup>3)</sup>

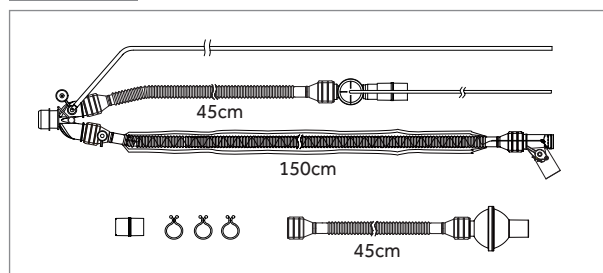


51002792 ダブルスリーブN成人用回路<sup>3)</sup>

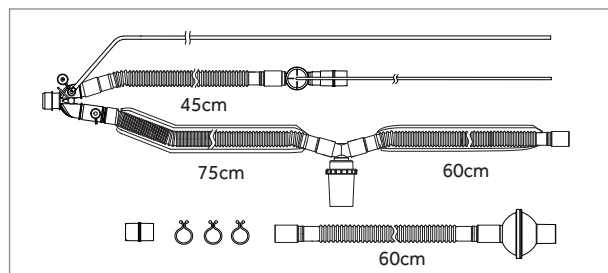


51002793 ダブルスリーブN小児用回路<sup>3)</sup>

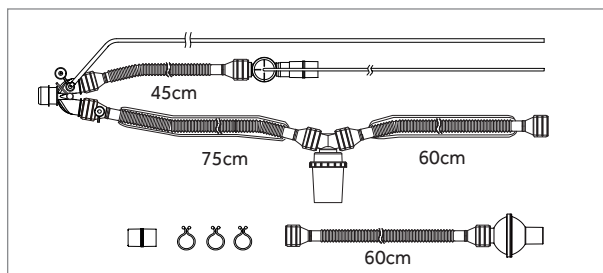

51002794 スムースホース N 成人用回路<sup>3)</sup>

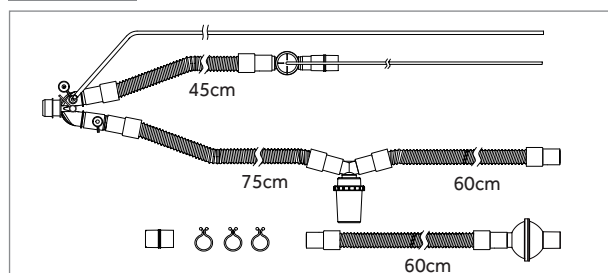


51003723 ダブルスリーブN成人用人工鼻回路<sup>3)</sup>

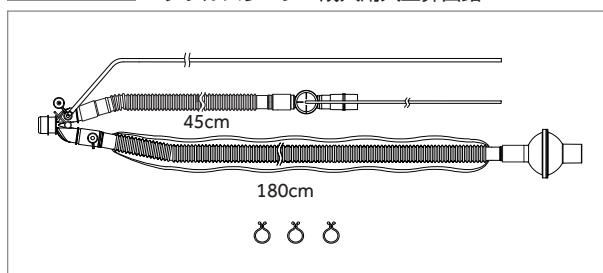


## INTERSURGICAL


NMN5191160 スムーズボア成人用呼気弁回路<sup>4)</sup>

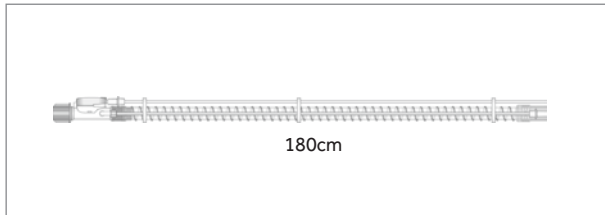

NMN5191170 スムーズボア成人用呼気弁回路<sup>4)</sup>

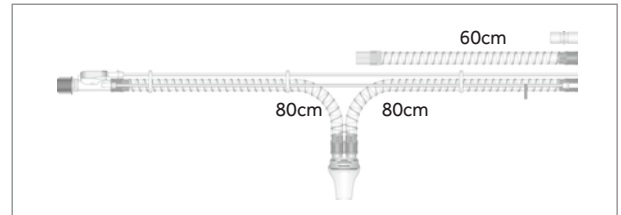


NMN5191850 スムーズボア成人呼気弁熱線回路<sup>4)</sup>

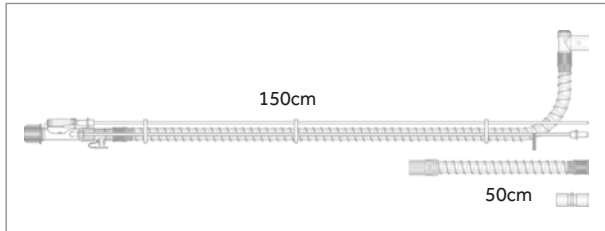

## Pneu-Moist


TKBMG102HT ディスポーザブル回路 (吸気ヒート)<sup>5)</sup>

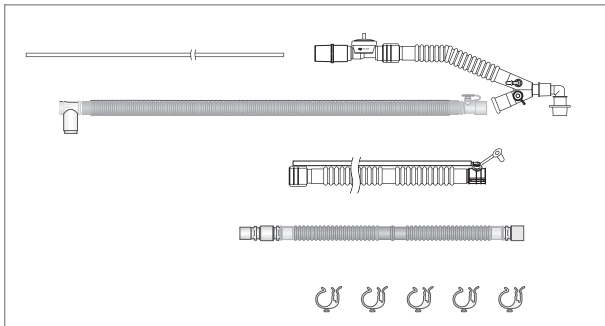


## 呼吸回路 (呼気弁なし)

### Pacific Medico

51003361 ダブルスリーブNリークマスク用回路<sup>3)</sup>

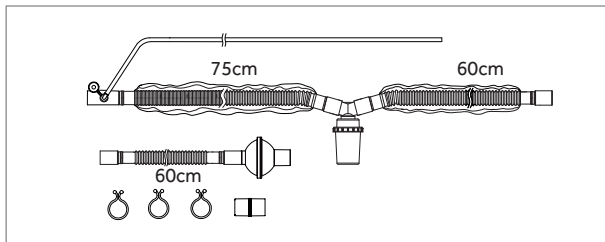

PMH51005488 ダブルスリーブN 小児用リークマスク用回路<sup>3)</sup>

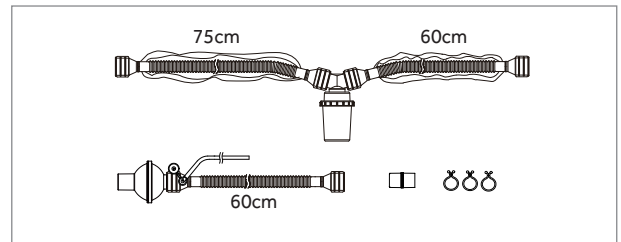

## 仕様

換気モード	従量式：V A/C、V SIMV 従圧式：CPAP、PSV、P A/C、P SIMV
一回換気量	50～2000mL
深呼吸	可
換気回数	1～60回/分
Backup数	4～40回/分
吸気時間	0.3～6.0秒
圧	5～55hPa
PEEP	OFF、1～20hPa
Target VT	OFF、50～2000mL
Rise Time	1～4
吸気感度	OFF、0P～5（7段階）
呼気感度	5～95%または-95～-5%
アラーム	低圧、高圧、V <sub>Ti</sub> 上限、V <sub>Ti</sub> 下限、V <sub>Te</sub> 上限、V <sub>Te</sub> 下限、無呼吸、 AC電源不良、バッテリー、F <sub>i</sub> O <sub>2</sub> 上限(オプション)、F <sub>i</sub> O <sub>2</sub> 下限(オプション) *オプションのF <sub>i</sub> O <sub>2</sub> 測定キット使用時
作動音	30dBA以下 設定1m
寸法	23.5(W)×31.5(D)×15.4(H)cm
重量	4.5kg
電源	AC: 100～240VAC、50/60Hz DC: 12～30VDC 内部バッテリー: 4～11時間（新品出荷時）
消費電力	最大180VA
通信	USBポート
航空輸送規格	RTCA/DO-160:2007適合

- 販売名 ピューリタンベネット 560  
医療機器承認番号 22300BZX00031000  
製造販売元 コヴィディエンジャパン株式会社
- 販売名 DAR ブリージングシステム  
医療機器認証番号 220AABZX00156000  
製造販売元 コヴィディエンジャパン株式会社
- 販売名 ブリージングシステム  
医療機器認証番号 223AFBZX00112000  
製造販売元 パシフィックメディコ株式会社
- 販売名 インターサージカル呼吸回路シリーズ  
医療機器認証番号 223AFBZX00106000  
製造販売元 日本メディカルネクスト株式会社
- 販売名 tkb Pneu-Moist呼吸回路システム  
医療機器認証番号 22300BZX00030000  
製造販売元 株式会社TKB

お問い合わせ先

**コヴィディエンジャパン株式会社**

RMS(Respiratory & Monitoring Solutions)事業部

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

© 2019 Medtronic.

**Medtronic**